

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Conti Spray (EKG Spray)

Conti Spray kitűnően csökkenti a bőr és az elektródák közötti ellenállást és így jól alkalmazható EKG diagnosztikához. Vízben oldódó. Könnyen eltávolítható a bőrről.

Használati utmutató:

- A spray használatra kész,
- Tisztítsa és zsírtalanítsa meg a páciens bőrét,
- Használja a megfelelő mennyiségű sprayt.
- Alkalmazza a készüléket az előírás szerint,
- A vizsgálat után a spray maradékát papírtörölközővel távolítsa el a bőrről, majd a szennyezett papírtörölközőt helyezze a szeméthyűjtőbe,
- Hagyja abba a használatát, ha a páciens érzékeny a termékre.

Figyelem:

- Csak külsőleg használható
- A termék nem steril
- Ne használja a gélt, ha a bőr sérült
- Előfordulhat nagyon ritkán bőrpír, allergiás reakció
- Szembe ne kerüljön
- Használat után a flakont ne hagyja nyitva
- Lejárta után a sprayt ne használja.
- Ha a vizsgáló bőre érzékeny, viseljen védőkesztyűt munka közben
- Ha a csomagolás tartalmaz utántöltésre alkalmas felcímkézett, üres flakont , abba csak a címkén szereplő nevű terméket szabad tölteni.

Összetevők: aqua, propylene glycol, sodium chloride, phenoxyethanol/ ethylhexylglycerin E131, E 102

Kiszerezés: 250 ml spray (35/ doboz)
5000 ml kanna (4 /doboz)

Tárolás: Hőmérséklet: +10°C ÷ +30°C , Relatív páratartalom: 30% ÷ 75%, UV fénytől elzártan.

Hulladék kezelés :Alkalmazza a vonatkozó állami és a helyi előírásokat

Eltarthatóság: a gyártástól számított 3 évig. Felbontás után 3 hónapig használható.

2021.03.01. V02

	Gyártó		Tárolási hőmérséklet		Gyártási azonosító		Figyelem
	Olvasd el a használati útmutatót		Polietilén csomagolás		Lejáratidő		Egyszer használatos eszköz
	nem steril		UV fénytől óvni		Orvostechnikai eszköz		

Ultragel Hungary 2000 Kft.

✉ 1023 Budapest Bécsi út 4.
☎ info@ultragel.hu

☎ +36 1 278 3050
🌐 www.ultragel.hu