

HiGel Guard felület fertőtlenítő- tisztító koncentrátum

HiGel Guard széles antimikrobiális spektrummal rendelkező , tisztító hatású fertőtlenítőszer A HiGel Guard erőteljes szennyoldó és szennylazító hatással rendelkezik (vér és fehérjék jelenlétében is), ezért különösen ajánlott ahol egyidejű tisztításra és fertőtlenítésre van szükség.

Alkalmazási területek:

Mosható felületek fertőtlenítésére - egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, betegszállításkor, stb.), idősek otthonában, szociális otthonokban, óvodákban, iskolákban, közintézményekben - és egyéb élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező felületek tisztító hatású fertőtlenítésére alkalmazható.

Tulajdonságok

Egy munkafázisban tisztít és fertőtlenít
Aldehyd, klór és alkoholmentes

Veszélyes összetevő:

Didecildimetil-ammónium-klorid 6,9 %;

Hatásspektrum

baktericid (beleértve MRSA is), fungicid, yeasticidal, virucid (burkos és burok nélküli vírusokra).

Használati utasítás, alkalmazási paraméterek:

A munkaoldatot mindig frissen felhasználás előtt kell elkészíteni.

Öntsük/permetezzük vagy egy átitatott törölkendővel/moppal vigyük fel a munkaoldatot a fertőtlenítendő felületre, úgy hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd a behatási idő után hagyjuk a felületet megszáradni, vagy szükség szerint vízzel öblítsük át a felületet.

A behatási idő alatt a felületet végig nedves állapotban kell tartani.

Alkalmazási paraméterek:

Koncentráció	Hőmérséklet	Behatási idő	Antimikrobiális spektrum
3%	környezeti	5 perc	baktericid, MRSA, yeasticid
4%	környezeti	15 perc	baktericid, MRSA, fungicid, yeasticid, szelektív virucid (norovírus, adenovírus és burkos vírus)
4%	környezeti	30 perc	virucid - csak előzetesen megtisztított felületen

Figyelmeztetés

Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető!


Mielőtt a fertőtlenítést elkezdené a felület egy kis részén ellenőrizze a termék alkalmasságát.

Tárolás, eltarthatóság:

Eredeti, bontatlan ép csomagolásban száraz, jól szellőztethető, hő- és napfény-mentes helyen 10-30°C hőmérséklet tartományban, gyártástól számított 3 évig eltartható.

Csomagolás, kiszerezési egység: 1, 5, 10 liter, PE flakon és kanna.

NNK engedély száma: 34044-3/2021/JIF

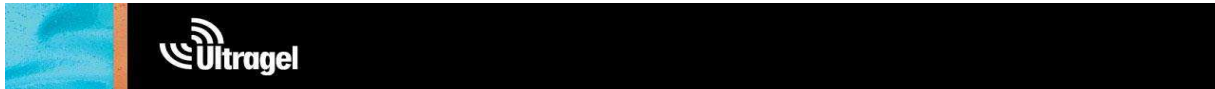

Terméktípus: PT2

Formuláció: folyékony koncentrátum

Felhasználói kör: professzionális

Biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások: A koncentrátum hígításakor viseljen megfelelő PPE-t (kesztyű, szemvédő, kezeslábas és lábbeli). A hígított termék felhordásakor tartsa be a megfelelő munkahigiénés intézkedéseket, használjon kesztyűt, kezeslábast és szükség esetén cipőt.

Elsősegély:

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos..

Belégzés: Vigye friss levegőre. Biztosítsunk nyugalmat számára. Biztosítsunk szabad légutakat. Rosszullét esetén hívjunk orvost. Ha a légzés rendszertelen vagy leáll., alkalmazzunk mesterséges légzést. Az eszméletlen sérültet helyezzük stabil oldalfekvésbe.

Bőr: Az elszennyeződött ruházatot vegyük le, a bőrre került anyagot bő szappannal és vízzel azonnal le kell mosni. Irritáció esetén hívjon orvost.

Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan langyos folyóvízzel a szemhéjak széthúzása mellett. Adott esetben a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább. 15 percig. Azonnal forduljunk orvoshoz. Az ép szemet letakarással védjük. Az öblítést a kórházba szállítás közben is folytassuk.

Lenyelés: Mossuk ki a szájüregét, majd adjunk sok vizet a sérültnek. Tilos hánytatni! Azonnal hívjunk orvost.

Az elsősegélynyújtó védelme: Nincs különleges előírás

Környezetvédelmi/ökotoxikológiai előírások: Tilos a hígítatlan terméket és annak maradványait állóvizetekbe, vízfolyásokba, talajba, közcsontrába juttatni. A kiömlött anyagot védőgáttal kell körülvenni, majd homokkal felitatni.

Hulladékkezelés: A termék maradványainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvekben meghatározottak az irányadók.

Veszélyes áruk szállítása (ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint)



Figyelmeztető mondat:

H290	Fémekre korrozív hatású lehet.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

P260	A gőzök, permet belélegzése tilos.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:

P301 + P330 + P331	LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338 + P310	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:

P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
-------------	---

Gyártó és forgalmazó:

Ultragel Hungary 2000 Kft
1023 Budapest, Bécsi út 4.

Telefon: +36-1 2783050

E-mail: info@ultragel.hu

www.ultragel.hu