

HiGel Health

felület fertőtlenítő- tisztító koncentrátum

A HiGel Health széles antimikrobiális spektrummal rendelkező, tisztító hatású fertőtlenítőszer. A HiGel Health erőteljes szennyoldó és szennyelazító hatással rendelkezik (vér és fehérjék jelenlétében is), ezért különösen ajánlott ahol egyidejű tisztításra és fertőtlenítésre van szükség.

Alkalmazási területek: mosható felületek fertőtlenítésére - egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, betegszállításnál, stb.), idősok otthonában, szociális otthonokban, óvodákban, iskolákban, közintézményekben - és egyéb élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező felületek tisztító hatású fertőtlenítésére alkalmazható.

Tulajdonságok

Egy munkafázisban tisztít és fertőtlenít
Aldehid, klór és alkoholmentes

Összetétel: Didecildimetil-ammonium-klorid (6.5%); N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin(5.3%), detergens, korroziogátló

Hatásspektrum

baktericid (beleértve MRSA is), fungicid, yeasticidal, virucid (burkos és burok nélküli vírusokra), mikobaktericid (tuberkulocid is)

Használati utasítás, alkalmazási paraméterek:

A munkaoldatot mindig frissen felhasználás előtt kell elkészíteni.

Öntsük/permetezzük vagy egy átitatott törülközővel/moppal vigyük fel a munkaoldatot a fertőtlenítendő felületre, úgy hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd a behatási idő után hagyjuk a felületet megszáradni, vagy szükség szerint vízzel öblítsük át a felületet.

A behatási idő alatt a felületet végig nedves állapotban kell tartani.

Alkalmazási paraméterek:

Koncentráció	Hőmérséklet	Behatási idő	Antimikrobiális spektrum
5%	környezeti	5 perc	baktericid, MRSA, yeasticid
0,25%	környezeti	60 perc	
2%	környezeti	30 perc	mikrobaktericid
1%	környezeti	60 perc	
7%	környezeti	60 perc	baktericid, MRSA, fungicid, yeasticid, virucid, mikrobaktericid

Figyelmeztetés

Mielőtt a fertőtlenítést elkezdené a felület egy kis részén ellenőrizze a termék alkalmasságát. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető!

Tárolás, eltarthatóság:

Eredeti, bontatlan ép csomagolásban száraz, jól szellőztethető, hő- és napfény-mentes helyen, 10-30°C hőmérséklet tartományban, gyártástól számított 2 évig eltartható.

Kiszerezés

1, 5, 10 liter PE flakon, illetve kanna

NNK engedély száma: 34042-3/2021/JIF



Terméktípus: PT2

Formuláció: folyékony koncentrátum

Felhasználói kör: professzionális

Biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások: A koncentrátum hígításakor viseljen megfelelő PPE-t (kesztyű, szemvédő, kezesszláb és lábbeli). A hígított termék felhordásakor tartsa be a megfelelő munkahigiénés intézkedéseket, használjon kesztyűt, kezesszlábat és szükség esetén cipőt.

Elsősegély:

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos.

Belégzés: Vigye friss levegőre. Biztosítsunk nyugalmat számára. Biztosítsunk szabad légutakat. Rosszullét esetén hívjunk orvost. Ha a légzés rendszertelen vagy leáll., alkalmazzunk mesterséges légzést. Az eszméletlen sérültet helyezük stabil oldalfekvésbe.

Bőr: Az elszennyeződött ruházatot vegyük le, a bőrre került anyagot bő szappannal és vízzel azonnal le kell mosni. Irritáció esetén hívjon orvost.

Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan langyos folyóvízzel a szemhéjak széthúzása mellett. Adott esetben a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább. 15 percig. Azonnal forduljunk orvoshoz. Az ép szemet letakarással védjük. Az öblítést a kórházba szállítás közben is folytassuk.

Lenyelés: Mossuk ki a szájüreget, majd adjunk sok vizet a sérültnek. Tilos hánytatni! Azonnal hívjunk orvost.

Az elsősegélynyújtó védelme: Nincs különleges előírás

Környezetvédelmi/ökotoxikológiai előírások: Tilos a hígítatlan terméket és annak maradékait állóvizekbe, vízfolyásokba, talajba, közcatornába juttatni. A kiömlött anyagot védőgáttal kell körülvenni, majd homokkal felitatni.

Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvekben meghatározottak az irányadók.

Veszélyes áruk szállítása (ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint)



Figyelmeztető mondat:

H302	Lenyelve ártalmas.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

P261	Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:

P301 + P330 + P331	ENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338 + P310	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:

P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
------	---

Gyártó és forgalmazó:

Ultragel Hungary 2000 Kft

1023 Budapest, Bécsi út 4.

Telefon: +36-1 2783050

E-mail: info@ultragel.hu

www.ultragel.hu