

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Aqualaser IPL& Laser gel

Aqualaser IPL& Laser gel nagy viszkozitású gél speciális IPL, Laser kezelésekhez. A bőr és a vizsgáló eszköz közötti ellenállást csökkenti, fizioterápiás kezelések hatékonyságát javítja.

Nem tartalmaz zsíros komponenst, könnyű eltávolítani, nem hagy foltot, vízzel eltávolítható, szagtalan. Nem tartalmaz olyan hatóanyagokat, amelyek károsíthatják a berendezést. Nem tartalmaz sót.

Használati útmutató:

- A gél használatra kész,
- Tisztítsa és zsírtalanítsa meg a páciens bőrét,
- Használja a megfelelő mennyiségű gél,
- Alkalmazza a készüléket az előírás szerint,
- A vizsgálat után a gél maradékát papírtörölközővel távolítsa el a bőrről, majd a szennyezett papírtörölközőt helyezze a szemégyűjtőbe,
- Hagyja abba a gél használatát, ha a páciens érzékeny a géltre.

Figyelem:

- Csak külsőleg használható
- A termék nem steril
- Ne használja a gél, ha a bőr sérült
- Előfordulhat nagyon ritkán bőrpír, allergiás reakció
- Szembe ne kerüljön
- Használat után a flakont ne hagyj nyitva
- Lejárta után a gél ne használja.
- Ha a vizsgáló bőre érzékeny, viseljen védőkesztyűt munka közben
- Ha a csomagolás tartalmaz utántöltésre alkalmas felcímkézett, üres flakont, abba csak a címkén szereplő nevű terméket szabad tölteni.




Összetevők: aqua, carbomer, sodium, hydroxide, EDTA, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin

Kiszerezés:	260 g flakon	50db/ doboz
	500 g flakon	24db/ doboz
	1000 g flakon	10db/ doboz
	5000 g kanna	4db/ doboz
	5000 g cubitainer	4db/ doboz

Tárolás: Hőmérséklet: +10°C ÷ +30°C, Relatív páratartalom: 30% ÷ 75%, UV fénytől elzártn.

Hulladék kezelés :Alkalmazza a vonatkozó állami és a helyi előírásokat

Eltarthatóság: a gyártástól számított 3 évig. Felbontás után 3 hónapig használható.
2021.03.01. V02

	Gyártó		Tárolási hőmérséklet		Gyártási azonosító		Figyelem
	Olvasd el a használati útmutatót		Polietilén csomagolás		Lejárató idő		Egyszer használatos eszköz
	nem steril		UV fénytől óvni		Orvostechnikai eszköz		

Ultragel Hungary 2000 Kft.

✉ 1023 Budapest Bécsi út 4.
☎ info@ultragel.hu

☎ +36 1 278 3050
🌐 www.ultragel.hu