

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RF krém „ prémium”

RF krém „ prémium „ terméket terápiás és diagnosztikai célra fejlesztettük ki. Széles frekvenciatartományban használható a különböző RF berendezéseknél. Krémszerű állaga segíti és növeli kézi eszköz mozgását a bőrön.

Használati útmutató:

- A termék használatra kész,
- Tisztítsa és zsírtalanítsa meg a páciens bőrét,
- Használja a megfelelő mennyiségű terméket,
- Alkalmazza a készüléket az előírás szerint,
- A vizsgálat után a termék maradékát papírtörölközővel távolítsa el a bőrről, majd a szennyezett papírtörölközőt helyezze a szemétygyűjtőbe,
- Hagyja abba a termék használatát, ha a páciens érzékeny rá.

Figyelem:

- Csak külsőleg használható
- A termék nem steril
- Ne használja, ha a bőr sérült
- Használat után az edényt zárja.
- Előfordulhat nagyon ritkán bőrpír
- Szembe ne kerüljön, irritációt okozhat
- Ha a kezelő érzékeny viseljen védőkesztyűt használat közben.
- Lejárta után ne használja.



Összetevők : aqua, paraffinium liquidum, petrolatum, stearic acid, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, fenoxietanol, ethylhexylglycerin

Csomagolás: 1000g mini bödön (9/ doboz)

Tárolás: Hőmérséklet: +10°C ÷ +30°C , Relatív páratartalom: 30% ÷ 75%, UV fénytől elzártan.

Hulladék kezelés :Alkalmazza a vonatkozó állami és a helyi előírásokat

Eltarthatóság: a gyártástól számított 3 évig. Felbontás után 3 hónapig használható.
2021.03.01. V02

	Gyártó		Tárolási hőmérséklet		Gyártási azonosító		Figyelem
	Olvasd el a használati útmutatót		Polietilén csomagolás		Lejárati idő		Egyszer használatos eszköz
	nem steril		UV fénytől óvni		Orvostechnikai eszköz		

Ultragel Hungary 2000 Kft.

✉ 1023 Budapest Bécsi út 4.
📧 info@ultragel.hu

☎ +36 1 278 3050
🌐 www.ultragel.hu