

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKG gél :Conti Cream ECG&EEG&EMG

A Conti Cream olyan speciális összetételű ECG gél, amely nagyon magas vezetőképességi tulajdonsággal és krémszerű textúrával rendelkezik, hogy a bőr és a vizsgáló eszköz közötti ellenállást fokozottan csökkentse.

Ezáltal megkönnyíti az orvos munkáját az ECG vizsgálatnál éppúgy, mint amikor a koponya elektromos aktivitását vizsgálja, vagy neurodiagnosztikai vizsgálatot végez. Kitűnően alkalmazható EEG, EMG diagnosztikában, éppúgy mint ECG vizsgálatnál. Könnyű eltávolítani mind az elektródokról, mind a bőrről. Defibrilláláshoz nem javasolt.

Használati utmutató:

- A Conti cream használatra kész,
- Tisztítsa és zsírtalanítsa meg a páciens bőrét,
- Használja a megfelelő mennyiségű gélt,
- Alkalmazza a készüléket az előírás szerint,
- A vizsgálat után a gél maradékát papírtörölközővel távolítsa el a bőrről, majd a szennyezett papírtörölközőt helyezze a szemétygyűjtőbe,
- Hagyja abba a gél használatát, ha a páciens érzékeny a géltre.
- Időnként rázza össze és ha szükséges hígítsa desztillált vízzel.

Figyelem:

- Csak külsőleg használható
- A termék nem steril
- Ne használja a gélt, ha a bőr sérült
- Előfordulhat nagyon ritkán bőrpír, allergiás reakció
- Szembe ne kerüljön
- Használat után a flakont ne hagyj nyitva
- Lejárta után a gélt ne használja.
- Ha a vizsgáló bőre érzékeny, viseljen védőkesztyűt munka közben

Összetevők:

aqua, glicerin, potassium betartarate, xanthan gum, sodium chloride, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin



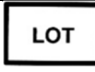









Kiszerezés:	260 g flakon	50db/ doboz
	500 g flakon	24db/ doboz
	1000 g flakon	10db/ doboz

Tárolás: Hőmérséklet: +10°C ÷ +30°C - Relative páratartalom: 30% ÷ 75%. A tárolóedényt tartsuk zárva, UV fénytől elzárta.

Hulladék kezelés :Alkalmazza a vonatkozó állami és a helyi előírásokat

Eltarthatóság: a gyártástól számított 3 évig. Felbontás után 3 hónapig használható.

2021.03.01. V02

	Gyártó		Tárolási hőmérséklet		Gyártási azonosító		Figyelem
	Olvasd el a használati útmutatót		Polietilén csomagolás		Lejárati idő		Egyszer használatos eszköz
	nem steril		UV fénytől óvni		Orvostechnikai eszköz		

**Ultragel Hungary 2000 Kft.**

✉ 1023 Budapest Bécsi út 4.  
☎ [info@ultragel.hu](mailto:info@ultragel.hu)

☎ +36 1 278 3050  
🌐 [www.ultragel.hu](http://www.ultragel.hu)