

Conti Spray kitűnően csökkenti a bőr és az elektródák közötti ellenállást és így jól alkalmazható EKG diagnosztikához. Vízben oldódó. Könnyen eltávolítható a bőrről.

Használati útmutató:

- A spray használatra kész.
- Tisztítsa és zsírtalanítsa meg a páciens bőrét!
- Használja a megfelelő mennyiségű sprayt!
- Alkalmazza a készüléket az előírás szerint!
- A vizsgálat után a spray maradékát papírtörölközővel távolítsa el a bőrről, majd a szennyezett papírtörölközőt helyezze a szeméthyűjtőbe.
- Hagyja abba a használatát, ha a páciens érzékeny a termékre!

Figyelem:

- Csak külsőleg használható!
- A termék nem steril!
- Ne használja a gélt, ha a bőr sérült!
- Előfordulhat nagyon ritkán bőrpír, allergiás reakció!
- Szembe ne kerüljön!
- Használat után a flakont ne hagyja nyitva!
- Lejárat után a sprayt ne használja!
- Ha a vizsgáló bőre érzékeny, viseljen védőkesztyűt munka közben!
- Ha a csomagolás tartalmaz utántöltésre alkalmas felcímkézett, üres flakont, abba csak a címkén szereplő nevű terméket szabad tölteni!

Összetevők: aqua, propylene glycol, sodium chloride, phenoxyethanol/ ethylhexylglycerin E131, E 102

Kiszerezés: 250 ml spray (35/doboz)
5000 ml kanna (4/doboz)



Tárolás: Hőmérséklet: +10°C ÷ +30°C Relatív páratartalom: 30% ÷ 75%, UV fénytől elzártn.

Hulladékkezelés: Alkalmazza a vonatkozó állami és a helyi előírásokat

Eltarthatóság: a gyártástól számított 3 évig. Felbontás után 3 hónapig használható.

Figyelmeztetés: az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden nem kívánt eseményt jelenteni kell a gyártónak, minden súlyos nem kívánt eseményt (MDR 2.cikk 65.pont) a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

2022.05.02. V01

	Gyártó		Tárolási hőmérséklet		Gyártási azonosító		Figyelem
	Olvassa el a használati útmutatót		Polietilén csomagolás		Lejárat idő		Egyszer használatos eszköz
	Nem steril		UV fénytől óvni!		Orvostechnikai eszköz		

Ultragel Medical Kft.

✉ 1022 Budapest, Aranka utca 12.
☎ +36 1 278 3050

✉ info@ultragelmedical.hu
🌐 www.ultragelmedical.hu