

Aqualaser IPL& Laser gel nagy viszkozitású gél speciális IPL, Laser kezelésekhez. A bőr és a vizsgáló eszköz közötti ellenállást csökkenti, fizioterápiás kezelések hatékonyságát javítja.

Nem tartalmaz zsíros komponenst, könnyű eltávolítani, nem hagy foltot, vízzel eltávolítható, szagtalan. Nem tartalmaz olyan hatóanyagokat, amelyek károsíthatják a berendezést. Nem tartalmaz sót.

Használati útmutató:

- A gél használatra kész.
- Tisztítsa és zsírtalanítsa meg a páciens bőrét!
- Használjon megfelelő mennyiségű gélt!
- Alkalmazza a készüléket az előírás szerint!
- A vizsgálat után a gél maradékát papírtörölközővel távolítsa el a bőrről, majd a szennyezett papírtörölközőt helyezze a szeméthyűjtőbe.
- Hagyja abba a gél használatát, ha a páciens érzékeny a géltre!

Figyelem:

- Csak külsőleg használható!
- A termék nem steril.
- Ne használja a gélt, ha a bőr sérült!
- Előfordulhat nagyon ritkán bőrpír, allergiás reakció.
- Szembe ne kerüljön!
- Használat után a flakont ne hagyja nyitva
- Lejárat után a gélt ne használja!
- Ha a vizsgáló bőre érzékeny, viseljen védőkesztyűt munka közben!
- Ha a csomagolás tartalmaz utántöltésre alkalmas felcímkézett, üres flakont, abba csak a címkén szereplő nevű terméket szabad tölteni.

Összetevők: aqua, carbomer, sodium, hydroxide, EDTA, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin

Kiszerezés:	260 g flakon	50db/ doboz
	500 g flakon	24db/ doboz
	1000 g flakon	10db/ doboz
	5000 g kanna	4db/ doboz
	5000 g cubitainer	4db/ doboz

Tárolás: Hőmérséklet: +10°C ÷ +30°C, Relatív páratartalom: 30% ÷ 75%, UV fénytől elzártnan.

Hulladék kezelés: Alkalmazza a vonatkozó állami és a helyi előírásokat

Eltarthatóság: a gyártástól számított 3 évig. Felbontás után 3 hónapig használható.

Figyelmeztetés: az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden nem kívánt eseményt jelenteni kell a gyártónak, minden súlyos nem kívánt eseményt (MDR 2.cikk 65.pont) a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

2022.05.02. V01

	Gyártó		Tárolási hőmérséklet		Gyártási azonosító		Figyelem
	Olvassa el a használati útmutatót!		Polietilén csomagolás		Lejárat idő		Egyszer használatos eszköz
	Nem steril		UV fénytől óvni!		Orvostechnikai eszköz		